


Intrebari frecvente

1. Testul Coretests detecteaza virusul SARS-CoV-2?

Testul nu detecteaza virusul. El detecteaza calitativ (prezent sau absent) a anticorpilor IgM si IgG ai SARS-CoV-2 in speciemenle de sange integral, sau plasma serul/ plasma pacientilor umani

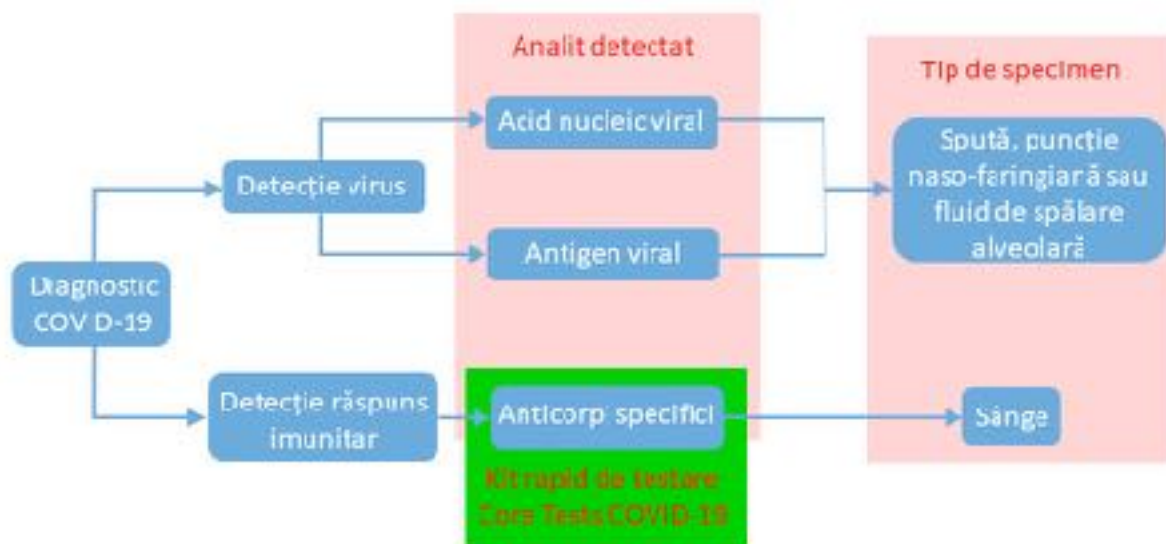

Medode de testare pentru diagnosticul COVID-19

2. Ce trebuie sa fac daca testul a iesit pozitiv?

Sa te prezinti la medic. Rezultatele acestui test trebuie corelate cu alte informatii si teste.

3. Testul iese pozitiv la pacientii asimptomatici?

DA, in limitele de detectie ale IgG si IgM

4. Poate fi detectata COVID 19 in perioada de incubatie?

DA, in limitele de detectie ale IgG si IgM

5. Ce sensibilitate are testul?

Sensibilitate 94% (78/83)
Specificitate 100% (87/87)
Acuratețe 97,1% (165/170).

6. Care este rata de fals pozitiv?

0%; Detectia unui anticorp indica 100% prezenta lui in corpul persoanei testate.

7. Care este rata de fals negativ?

2.4%

8. La ce interval de la infectare este eficient testul?

In primele zile de la infectie, prezenta IgM poate fi sub nivelul de detectare al testului.


IgM apare in stadiile incipiente ale infectiei (incepand cu ziua a 3-a)

IgG apare dupa ziua a 12-a.

Graficul de mai jos este orientativ. Rata de detectare a IgM creste spre 100% in ziua 5.

Referință: Medscape Novel Coronavirus: Study Suggests Multiple Shedding Routes

Nicola M. Parry, DVM Feb 21, 2020 <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1729071>

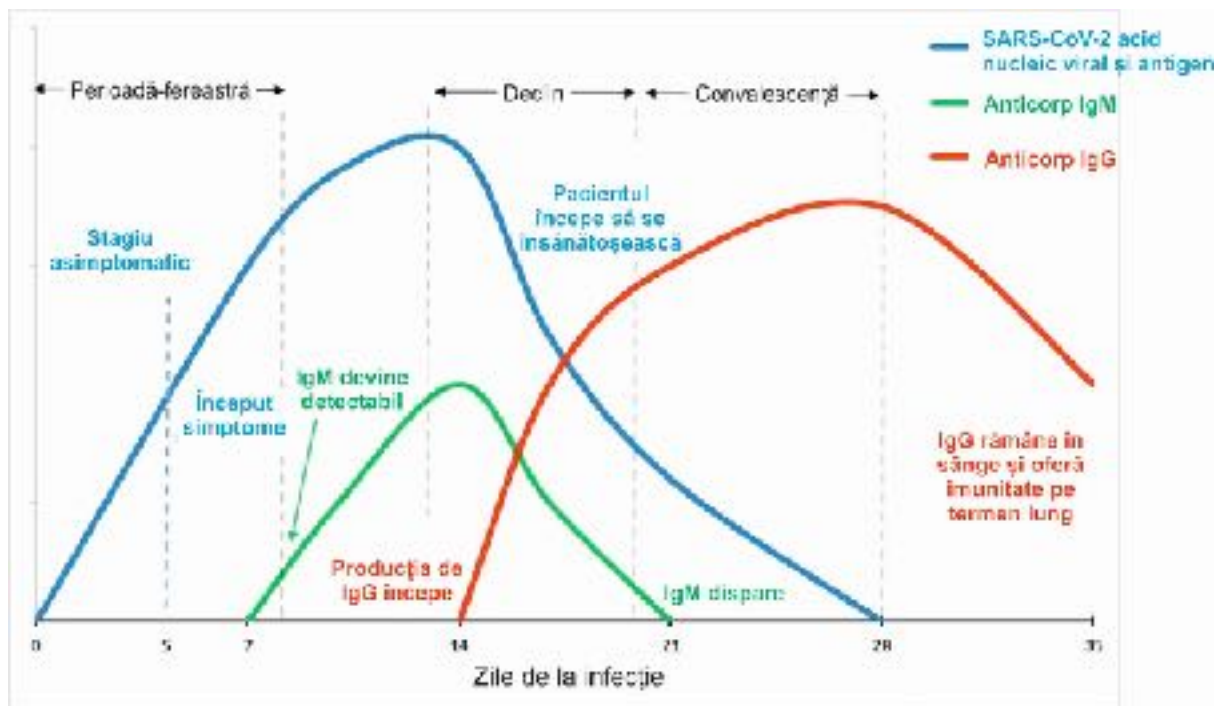

9. Este nevoie de un aparat pentru analiza testului?

Nu. Testul se citește de către utilizator, ca un test rapid de sarcină, de exemplu, la 10-15 minute după ce s-a pus o picătură de sânge pe el.

10. Testul este autorizat?

Testul are toate autorizările pentru import și comercializare în UE.

11. Testele se pot folosi individual?

Da. Pe lângă cutia care conține un recipient de soluție tampon, se livrează și pliculețele din poza atașată, care conțin: 25 tamponuri cu alcool, 25 minirecipienti cu soluție tampon și pipete pentru soluția tampon (dacă folosiți flaconul din cutie nu este necesară pipeta).



13. Ce conține un kit de testare?

- 1 întepător
- 1 placută de testare IgG/IgM
- 1 pipetă pentru recoltarea sângelui
- 1 pipetă pentru soluția tampon
- 1 tampon cu alcool
- 1 miniflacon cu soluție tampon